

医疗急救卡



我佩戴有医生规定必须使用的医疗器械。

Medtronic

如果出现紧急情况，请联系

医生姓名：

电话号码：

紧急联系人：

电话号码：

我是糖尿病患者






如果我的行为很奇怪，如果我看上去像喝醉了，或者我不省人事，这些都可能是严重低血糖引起的。

我不是喝醉了 请寻求医疗帮助

如果我清醒并能吞咽，请给我糖源（例如：果汁、糖果或非无糖软饮料）。如果我不省人事，请不要尝试让我吃东西或喝东西。

医疗专业人员

我佩戴胰岛素泵。

- 此胰岛素泵以恒定速率输注速效胰岛素。
- 要停止泵上的胰岛素输注：
 - 按任意按钮即可唤醒泵。
 - 按 。
 - 按屏幕上高亮显示的按钮以解锁泵。
 - 按  以高亮显示**暂停输注**。
 - 按 。
 - 按  以高亮显示**是**。
 - 按  可以暂停胰岛素输注。
- **请勿**取出泵电池。
- 如果没有医疗同意书，**请勿**取下泵。
- 如果泵发出报警声，请按照泵屏幕上的说明操作或拨打24小时技术支持电话 1-800-646-4633。

机场信息



我佩戴有医生规定必须使用的医疗器械。

Medtronic

机场安检

- 由于出行规定可能会改变，建议出行前与运输安全管理局 (TSA) 进行核对。在 <http://www.tsa.gov/travel/specialprocedures> 或通过致电 1-866-289-9673，均可找到 TSA 信息。
- **不得** 让泵通过用于检查手提行李或托运行李的 X 光机。
- 全身扫描仪也是一种 X 光机。如果选择通过全身扫描仪，则必须移除胰岛素泵并在植入部位断开输注管路的连接。如果使用持续葡萄糖监测 (CGM)，则必须在扫描前移除探头和发送器。
- 若要避免移除您的器械，您必须请求采用不使用 X 射线的替代检查流程。
- 您的胰岛素泵、输注管路、储药器和 CGM 系统均可以承受机场安检点使用的机场金属探测器的检测。

飞行中

MiniMed™ 770G 胰岛素泵及系统器械适合在飞机上使用。飞行时，让泵与您的身体保持连接状态并且频繁地检查血糖水平很重要。

患者信息

本人姓名：

本人地址：

电话号码：

医疗器械信息

医疗器械类型：

器械序列号：

© 2019 Medtronic. 保留所有权利。Medtronic、Medtronic 徽标及 Further, Together 都是 Medtronic 的商标。所有其他品牌都是 Medtronic 所属公司的商标。

Medtronic



Medtronic MiniMed
18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325 USA
1800 646 4633
+1818 576 5555
www.medtronicdiabetes.com

M998594A003_1