


随身卡




MiniMed™ 770G系统

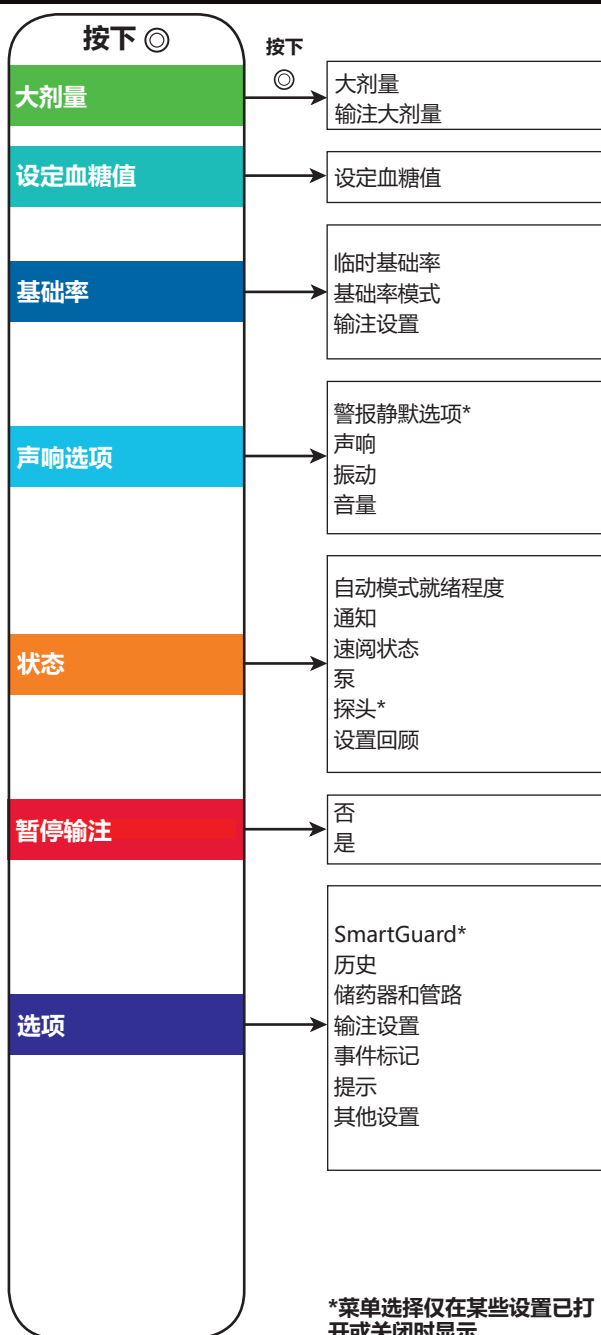


手动模式下不包含CGM的主页屏幕





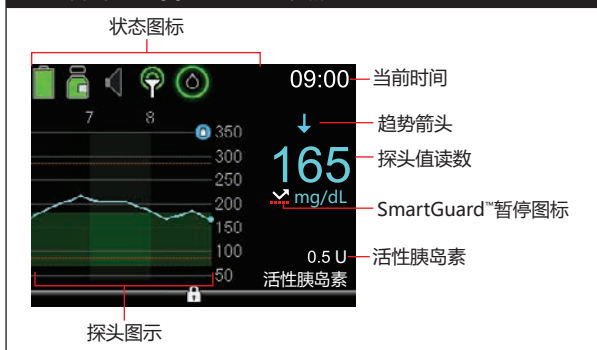

手动模式下包含CGM的主页屏幕

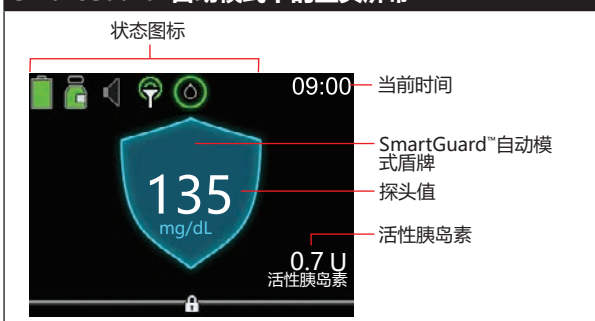

SmartGuard™ 自动模式下的主页屏幕



停止和恢复胰岛素输注

<p>停止所有胰岛素输注</p> <p>“暂停输注”选项停止所有胰岛素输注（基础率和大剂量）。</p>	<p>要停止所有胰岛素输注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 从“主页”屏幕按 , 然后选择暂停输注。 2. 出现提示时，选择是。
<p>恢复基础率胰岛素输注</p> <p>“恢复输注”选项会在泵已暂停后重启基础率输注。“恢复输注”选项不会重启大剂量输注。</p>	<p>要恢复基础率胰岛素输注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 从主页屏幕按 , 然后选择恢复输注。 2. 出现提示时，选择是。 <p>注：如果暂停泵时正在使用临时基础率，那么如果仍有剩余时间，则会恢复临时基础率。</p>
<p>停止大剂量输注</p> <p>“停止大剂量”选项仅停止大剂量输注。“停止大剂量”选项不会停止基础率输注。</p>	<p>要停止“SmartGuard™ 自动模式”大剂量、“手动模式”常规大剂量或“双波”（Dual Wave™）大剂量的“常规波”部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 从主屏幕按 , 然后选择停止大剂量。 2. 出现提示时，选择是。 3. 选择完成。 <p>要停止方波（Square Wave™）大剂量或双波（Dual Wave™）大剂量的“方波”部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 从主屏幕按 , 然后选择大剂量。 2. 选择停止大剂量。 3. 出现提示时，选择是。 4. 选择完成。
<p>SmartGuard™ 暂停输注事件期间手动恢复基础率输注</p> <p>如果不想在 SmartGuard™ 暂停事件期间等泵自动恢复基础率胰岛素，则可以手动恢复基础率输注。</p>	<p>要手动恢复基础率输注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 从“主页”屏幕按 , 然后选择低探头值前已暂停输注或低探头值时已暂停输注。SmartGuard™ 暂停输注状态屏幕出现。 2. 选择恢复基础率。 3. 出现提示时，选择是。

© 2020 Medtronic。保留所有权利。Medtronic、Medtronic徽标及Further, Together都是Medtronic的商标。所有其他品牌都是Medtronic所属公司的商标。

MiniMed™、SmartGuard™、Dual Wave™以及Square Wave™都是Medtronic MiniMed, Inc的商标。

Medtronic



Medtronic MiniMed
18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325 USA
1800 646 4633
+1818 576 5555
www.medtronicdiabetes.com

M998600A003_1