


Para Programar un Índice Basal Individual:




1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.
Presione **ACT**.

2. Desplácese a **Configuración basal**.
Presione **ACT**.

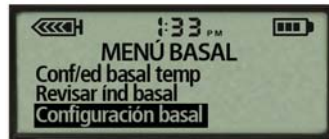

3. **Config/editar basal** está seleccionado.
Presione **ACT**.

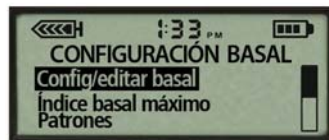


4. Use **▲** para programar la cantidad basal.
Presione **ACT**.



5. Presione **ACT** otra vez para ignorar **CONF HORA INICIO 2**.

6. Aparece la pantalla de **ÍNDICE BASAL**, que muestra el índice actual (u/h); hora de inicio del índice y total en 24 hr.

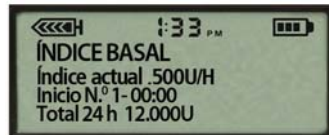

Para Cambiar un Índice Basal:

1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.
Presione **ACT**.

2. Desplácese a **Configuración basal**. Presione **ACT**.


3. **Config/editar basal** está seleccionado.
Presione **ACT**.

4. Use las flechas para cambiar la cantidad de índice basal. Presione **ACT**.



5. Presione **ACT** otra vez para ignorar **CONF HORA INICIO 2**.

6. Aparece la pantalla de **ÍNDICE BASAL** con el nuevo índice basal (u/h); hora de inicio del índice y total en 24 hr.

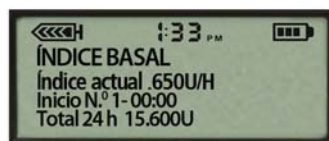

Para Agregar un Índice Basal:

1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.
Presione **ACT**.

2. Desplácese a **Configuración basal**.
Presione **ACT**.

3. **Config/editar basal** está seleccionado.
Presione **ACT**.

4. Presione **ACT** para confirmar **ÍNDICE BASAL 1**.

5. Use las flechas para **CONF HORA INICIO 2**.
Presione **ACT**.




6. Use las flechas para **CONF ÍNDICE BASAL 2**.
Presione **ACT**.



7. Repita pasos 5 y 6 según sea necesario.
Presione **ACT** para ignorar la última **CONF HORA INICIO**.




8. Aparece la pantalla de **ÍNDICE BASAL** que muestra el índice actual (u/h); hora de inicio del índice y total en 24 hr.

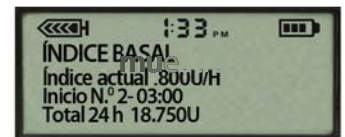


Para Revisar Índice(s) Basal(es):

1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.
Presione **ACT**.

2. Seleccione **Revisar ind basal**.
Presione **ACT**.

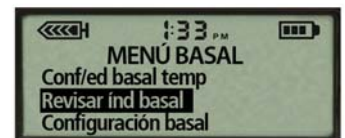

3. **ESTÁNDAR** y total de 24 horas aparece en la línea de arriba. Abajo están los índices basales programados, mostrando la hora de inicio y unidades por hora de cada una.

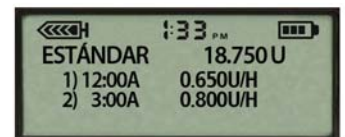

Nota: Las configuraciones mostradas son únicamente con propósito ilustrativo — sus configuraciones serán diferentes.

Índice Basal Temporal

Esta función le permite incrementar o reducir inmediatamente su índice basal, por el periodo temporal de tiempo que usted programe. Principalmente cuando ejercita y se enferma.


Para Programar Tipo de Basal Temporal:

1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.

Presione **ACT.**


2. Desplácese a **Configuración basal**.

Presione **ACT.**

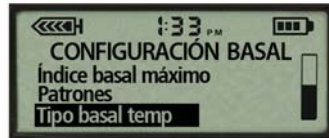

3. Desplácese a **Tipo basal temp**. Presione **ACT.**


4. Seleccione **Índice basal (U/H)** o **Porcentaje de basal**. Presione **ACT.**

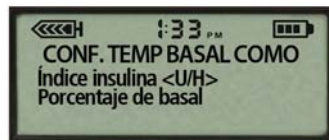

Para Programar Índice Basal Temporal:

1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.

Presione **ACT.**

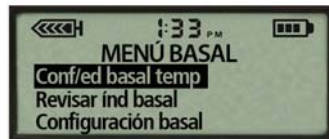

2. **Conf/ed basal temp** está subrayado.

Presione **ACT.**

3. Use **▲** para programar duración de tiempo.

Presione **ACT.**



4. Use las flechas para **CONFIG TEMP BASAL U/H** o **CONFIG TEMP BASAL %**. Presione **ACT** para iniciar índice basal temp.

5. Un círculo abierto en la parte superior de la pantalla y una alerta por hora indica que basal temp está trabajando.




Para Cancelar Índice Basal Temporal:

1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.

Presione **ACT.**

2. Seleccione **Cancelar basal temp**.

Presione **ACT.**

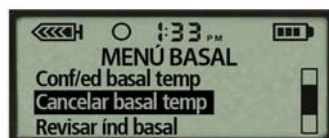

3. El círculo abierto desaparecerá cuando basal temp ha sido cancelado.

Patrones

Esta función le permite pre-programar hasta tres diferentes índices basales para poder fácilmente acomodar cambios de horario de rutina (ejemplo: día de semana vs. fin de semana; día vs. turno nocturno, etc.).


Para Iniciar Patrones (On):

1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.

Presione **ACT.**

2. Seleccione **Configuración basal**.

Presione **ACT.**

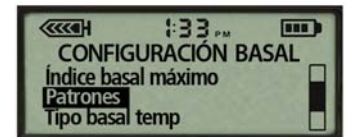


3. Seleccione **Patrones**.

Presione **ACT.**

4. Seleccione **On**.

Presione **ACT.**

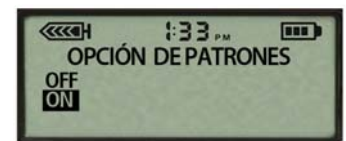

Para Programar Patrones Basal:

1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.


Presione **ACT.**

2. Desplácese a **Configuración basal**. Presione **ACT.**

3. **Config/editar basal** está subrayado. Presione **ACT.**

4. Subraye **Patrón A**.

Presione **ACT.**

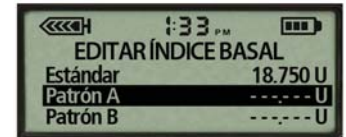


5. Use **▲** a **CONF ÍNDICE BASAL 1**. Presione **ACT.**

6. Configure otras horas o índices según sea necesario O Presione **ACT.**

7. Aparece pantalla **ÍNDICE BASAL A**. El círculo abierto en la parte superior de la pantalla indica que **Patrón A** está activo.

Presione **ESC.**

8. Repita pasos 3 a 7 para configurar **Patrón B**.

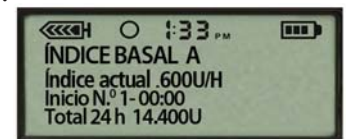


Para Escoger Patrón Basal:

1. De **MENÚ PRINCIPAL**, desplácese a **Basal**.

Presione **ACT.**

2. Desplácese a **Selección patrones**.

Presione **ACT.**

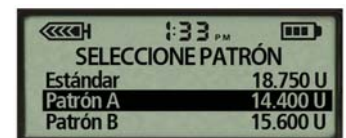

3. Subraye el patrón que quiere iniciar. Presione **ACT.**

Nota: Las configuraciones mostradas son únicamente con propósito ilustrativo — sus configuraciones serán diferentes.