

Para Activar el Bolus Wizard (On):



1. De MENÚ PRINCIPAL, seleccione **Bolus**. Presione **ACT**.


2. Desplácese a **Configuración bolus**. Presione **ACT**.



3. Seleccione **Conf. Bolus Wizard**. Presione **ACT**.



4. Seleccione **Editar config.** Presione **ACT**.

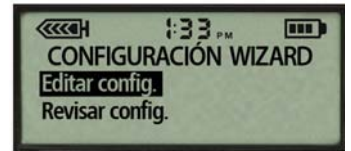

5. Aparece la pantalla de **EDITAR CONFIG.** Presione **ACT**.




6. Seleccione **ON**. Presione **ACT**.



Continúe a la sección siguiente para programar la configuración.

Para Programar Configuraciones:


1. Seleccione **Unid. CH**. Presione **ACT**.

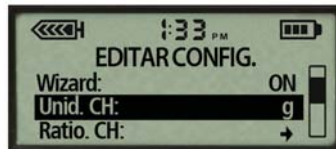

Seleccione **Gramos**. Presione **ACT**.




2. Seleccione **Ratio CH**. Presione **ACT**.

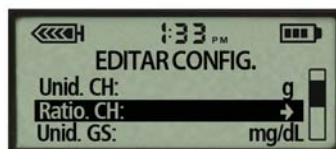


Use las flechas para configurar **Ratio**. Presione **ACT**. Para omitir **CONF. HORA DE INICIO 2** presione **ACT** otra vez.




3. Seleccione **Unid. GS**. Presione **ACT**.

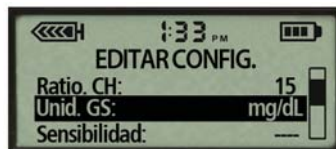

Seleccione **mg/dL**. Presione **ACT**.

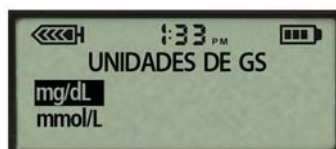

4. Seleccione **Sensibilidad**. Presione **ACT**.

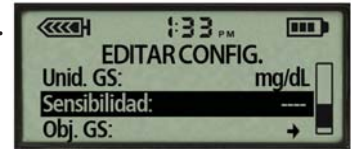

Use las flechas para programar **Sensibilidad**. Presione **ACT**. Para omitir **CONF. HORA DE INICIO 2** presione **ACT** otra vez.




5. Seleccione **Obj. GS**. Presione **ACT**.



Use las flechas para configurar **Objetivo** Bajo y Alto. Presione **ACT** después de cada uno. Presione **ACT** otra vez para omitir **CONF. HORA DE INICIO 2**.



6. Seleccione **Dur Ins Activa**. Presione **ACT**.

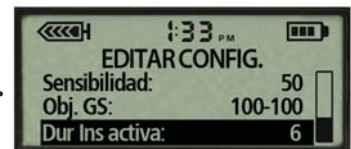




Use las flechas para programar **Hora**. Presione **ACT**. Presione **ESC**.






Configuración de Bolus Wizard está completa.

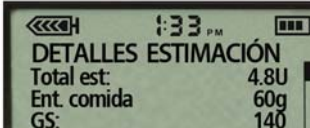


Suministrando Bolus de Comida y de Corrección:

1. Presione **⏏**. Examine GS. Si usa un medidor adherido presione **ACT**. **O**, use las flechas para ingresar su GS. Presione **ACT**.

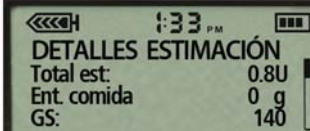2. Use **⬆** para ingresar los gramos de carbohidrato. Presione **ACT**.

3. Revise los detalles. Presione **ACT**.

4. Confirme la cantidad de bolus (cámbiela si es necesario). Presione **ACT** para suministrar.

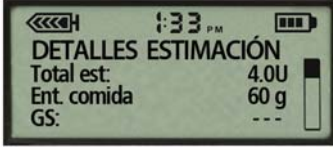Suministrando Corrección de Bolus (no comida):



1. Presione **⏏**. Examine su GS. Si tiene un medidor adherido presione **ACT**. **O**, use las flechas para ingresar su GS. Presione **ACT**.

2. Deje en cero los gramos de carbohidrato. Presione **ACT**.

3. Revise los detalles. Presione **ACT**.

4. Confirme cantidad de bolus (cambie si es necesario). Presione **ACT** para suministrar.

Suministrando un Bolus de Comida (no GS):

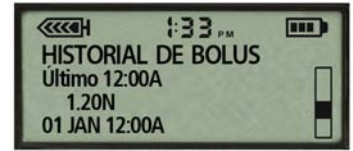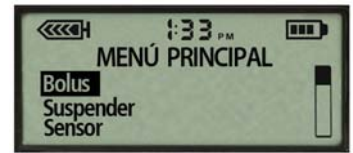1. Presione **⏏**. Deje los guiones en la pantalla de **INTRODUCCIÓN GS**. Presione **ACT**.

2. Use **⬆** e ingrese gramos de carb. Presione **ACT**.

3. Revise los detalles. Presione **ACT**.

4. Confirme la cantidad de bolus (cambie si es necesario). Presione **ACT** para suministrar.


Para Revisar el Historial de Bolus:

1. Presione **ACT**. Seleccione **Bolus**. Presione **ACT**.
2. Desplácese a **Historial de Bolus** y Selecciónelo. Presione **ACT**.
3. Use las flechas para revisar boluses suministrados.





Para Editar Configuración de Bolus Wizard:

1. Presione **ACT**. Seleccione **Bolus**. Presione **ACT**.
2. Desplácese a **Configuración bolus**. Presione **ACT**.
3. Seleccione **Conf. Bolus Wizard**. Presione **ACT**.
4. Seleccione **Editar Config**. Presione **ACT**.
5. Seleccione la configuración que quiera editar. Presione **ACT**.
6. Cambie el valor. Presione **ACT**.

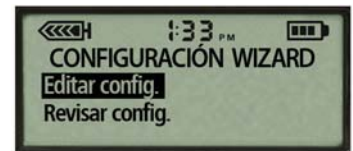

Para Revisar Configuraciones de Bolus Wizard

1. Presione **ACT**. Seleccione **Bolus**. Presione **ACT**.
2. Desplácese a **Configuración bolus**. Presione **ACT**.
3. Seleccione **Conf. Bolus Wizard**. Presione **ACT**.
4. Seleccione **Revisar config**. Presione **ACT**.
5. Use las flechas para desplazarse y revisar las configuraciones.

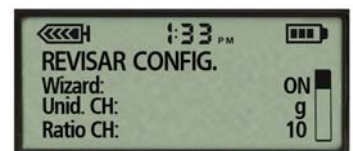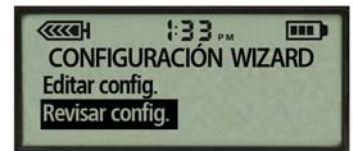

Nota: Las configuraciones mostradas son únicamente con propósito ilustrativo — sus configuraciones serán diferentes.