

Monitoreo Continuo de Glucosa (MCG): Lista de material de pre-capacitación y capacitación de MCG


Felicidades por elegir el sistema MiniMed® 530G con Enlite®. Con su nuevo sistema MCG y la educación adecuada, está tomando un paso importante hacia una vida con mejor control de la diabetes.

Lista de pre-capacitación

Complete lo siguiente antes de reunirse con su educador:

PASO 1: Cargue su nuevo transmisor MiniLink® REAL-Time

- ✓ Conecte el transmisor MiniLink al cargador. Sujete la parte plana del transmisor hacia abajo, empuje los dos componentes plenamente.

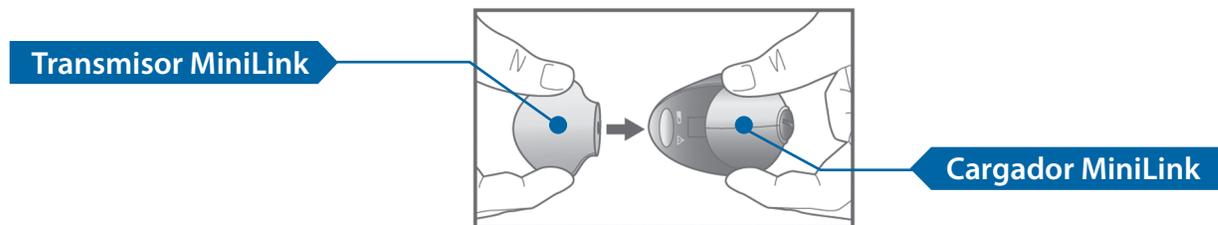

- ✓ La luz verde del cargador MiniLink se encenderá y se apagará hasta que esté completamente cargado. Una vez que esté completamente cargado, la luz verde permanecerá encendida durante 15 a 20 segundos antes de apagarse por completo. El transmisor MiniLink está completamente cargado cuando la luz verde deja de parpadear completamente. Cargarse completamente dura menos de 5 minutos, ya que el MiniLink viene pre-cargado de la fábrica.
- ✓ Deje el transmisor en el cargador, y guárdelo nuevamente en la caja para traerlo a su clase.

Para obtener más información sobre cómo cargar el transmisor MiniLink, consulte la Guía del usuario del transmisor MiniLink REAL-Time incluida en la caja del MiniLink.

PASO 2: Revise todos los documentos en el sobre de capacitación, incluyendo:

- ✓ *Empezando con Monitoreo continuo de glucosa para el sistema MiniMed 530G con Enlite*
- ✓ *Empezando con MCG para el sistema MiniMed 530G con Enlite: Guía de aprendizaje*

PASO 3: Complete los cursos en Internet de myLearning* y configuración de CareLink®

Si tiene acceso a Internet:

- ✓ Entre a la página de Internet my.medtronicdiabetes.com/mylearning* y complete los cursos de Monitoreo continuo de glucosa para el sistema MiniMed 530G con Enlite.
- ✓ Regístrese para el uso del software CareLink Personal en www.medtronicdiabetes.com/carelink.*

No inserte el sensor de glucosa o use su transmisor MiniLink hasta que haya asistido a una capacitación o haya recibido instrucciones de su proveedor de cuidado de salud.

Lista de materiales para su capacitación

Debe traer el día de su capacitación de MCG:

Bomba de insulina.

Caja del transmisor MiniLink® REAL-Time y todo lo que la caja incluye:

- ✓ Transmisor MiniLink.
 - ✓ Cargador MiniLink (con batería AAA).
 - ✓ Dispositivo Enlite® serter.
-

Folder de capacitación y todo lo que incluye:

- ✓ Ésta lista.
 - ✓ *Empezando con Monitoreo continuo de glucosa para el sistema MiniMed 530G con Enlite®.*
 - ✓ *Guía de aprendizaje: Empezando con MCG para el sistema MiniMed 530G con Enlite®.*
-

Dos sensores de glucosa Enlite

- ✓ Tenga cuidado de no dejar los sensores de glucosa en el auto donde puede estar demasiado caliente o el sensor de glucosa pueda dañarse.
-

Toallitas de alcohol.

Cinta adhesiva para el Enlite (bolsa pequeña localizada en la caja del sensor Enlite)

Medidor de glucosa sanguínea, tiras reactivas y lancetas

- ✓ Tenga cuidado de no dejar su medidor y las tiras reactivas en el auto donde puede estar muy caliente y se dañen.
-

Tabletas de glucosa o un refrigerio

Artículos adicionales que su educador requiera

- ✓ Certificado de finalización de los cursos de MCG en Internet en myLearning.

www.MedtronicDiabetes.com

Medtronic, Inc. | Diabetes

18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325
USA
1-800-646-4633



*Por ahora sólo disponible en inglés.