

Tarjeta de emergencia médica



Llevo un dispositivo médico necesario recetado por mi médico.

Medtronic

En caso de emergencia, póngase en contacto con:

Nombre del médico:

Número de teléfono:

Contacto en caso de emergencia:

Número de teléfono:

Tengo diabetes.

Si mi comportamiento es extraño (como si estuviese en estado de embriaguez) o estoy inconsciente, podría ser porque mi nivel de glucosa en sangre es demasiado bajo.

No estoy en estado de embriaguez. Solicite ayuda médica.

Si estoy consciente y puedo tragar, deme algún alimento que contenga azúcar (por ejemplo: zumo, caramelos, refrescos que no sean light). No intente darme comida o bebida si estoy inconsciente.

Profesionales sanitarios

Llevo una bomba de insulina externa.

- La bomba de insulina administra insulina de acción rápida a una velocidad constante.
- Para detener la infusión de insulina en la bomba de insulina:
 - Pulse cualquier botón para activar la bomba de insulina.
 - Pulse el botón Menú .
 - Pulse el botón resaltado mostrado en la pantalla para desbloquear la bomba de insulina.
 - Pulse  para seleccionar **Suspender infusión**.
 - Pulse el botón Derecha > para resaltar **Sí**.
 - Pulse  para suspender la infusión de insulina.
- **No** extraiga la pila de la bomba de insulina.
- **No** retire la bomba de insulina sin consentimiento médico.
- Si la bomba de insulina emite una alarma, siga las instrucciones de la pantalla o llame a la línea de asistencia 24 horas en el número de teléfono 1-800-646-4633.

Información para los aeropuertos



Llevo un dispositivo médico necesario recetado por mi médico.

Medtronic

Seguridad en el aeropuerto:

- Dado que las reglas de viaje están sujetas a cambios, se recomienda consultar a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos antes de viajar. Puede encontrar información sobre la TSA en <http://www.tsa.gov/travel/special-procedures> o llamando al 1-866-289-9673.
- La bomba de insulina no debe pasar por las máquinas de rayos X que se utilizan para escanear el equipaje de mano o facturado.
- El escáner de cuerpo completo también es una forma de rayos X. Si decide someterse a una exploración de cuerpo completo, deberá desconectar y retirar la bomba de insulina, y si utiliza la monitorización continua de glucosa (MCG), deberá retirar el sensor y el transmisor antes de la exploración.
- Debe desconectar el equipo de infusión antes de someterse a una exploración de cuerpo completo.
- Para evitar que tenga que quitarse sus dispositivos, deberá solicitar un proceso alternativo de evaluación que no utilice rayos X.
- La bomba de insulina, el equipo de infusión, el reservorio y el sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) pueden resistir la exposición a los detectores de metales que se utilizan en los puntos de seguridad de los aeropuertos.

En el avión:

El sistema se compone de dispositivos inalámbricos de baja potencia que se han sometido a prueba conforme a la normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Parte 15.247. Si el personal de la aerolínea le pregunta sobre el uso del sistema, muéstrele esta tarjeta. Si, aun así, el personal de la aerolínea le pide que lo apague, deberá hacerlo.

Información del paciente

Mi nombre:

Mi dirección:

Número de teléfono fijo:

Información sobre el dispositivo médico

Tipo de dispositivo médico:

Número de serie del dispositivo:

© 2018 Medtronic. Reservados todos los derechos. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, Together son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una compañía de Medtronic.

Medtronic



Medtronic MiniMed
18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325
USA
800 646 4633
818 576 5555
www.medtronicdiabetes.com

6026106-252_A