



TARJETA DE BOLSILLO



MiniMed® 670G

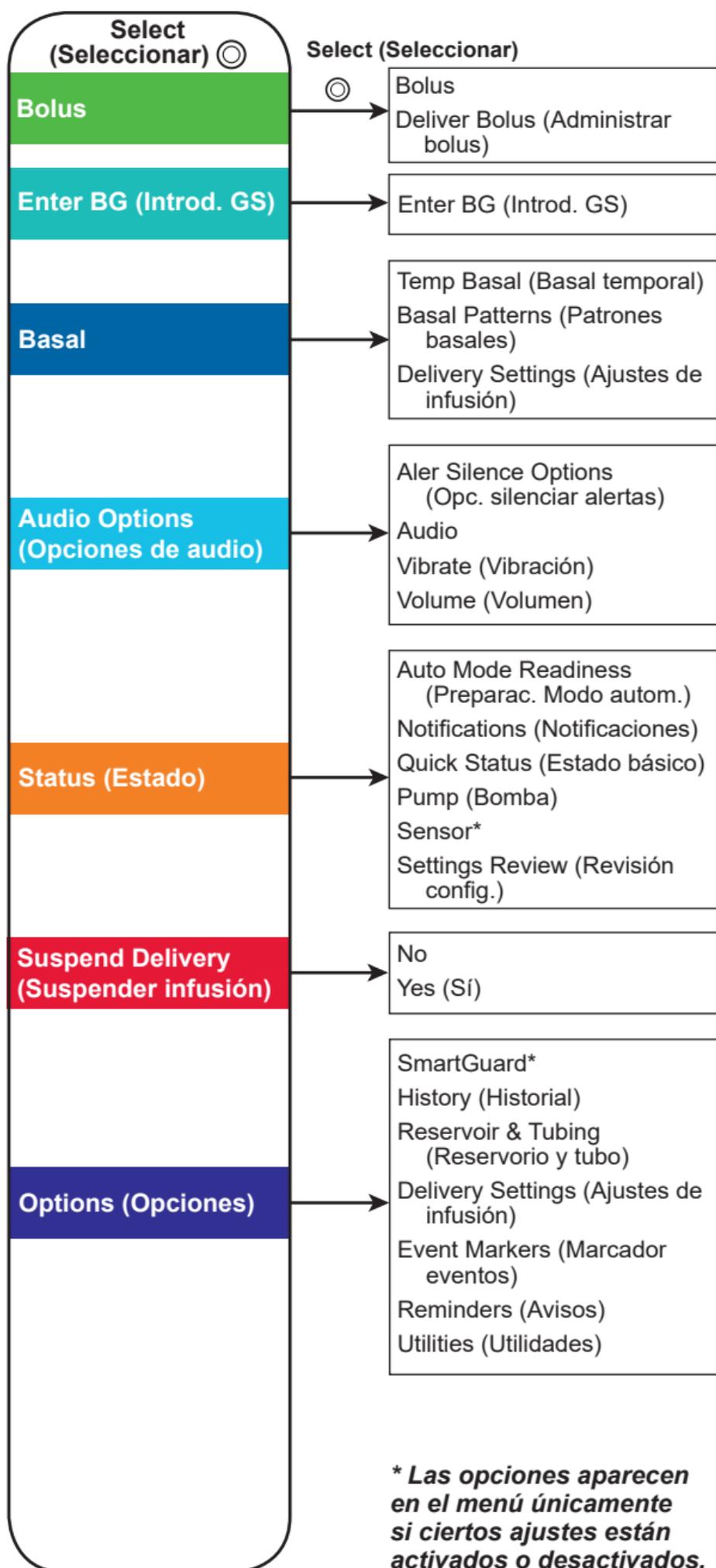

Pantalla de inicio sin MCG en el modo manual:

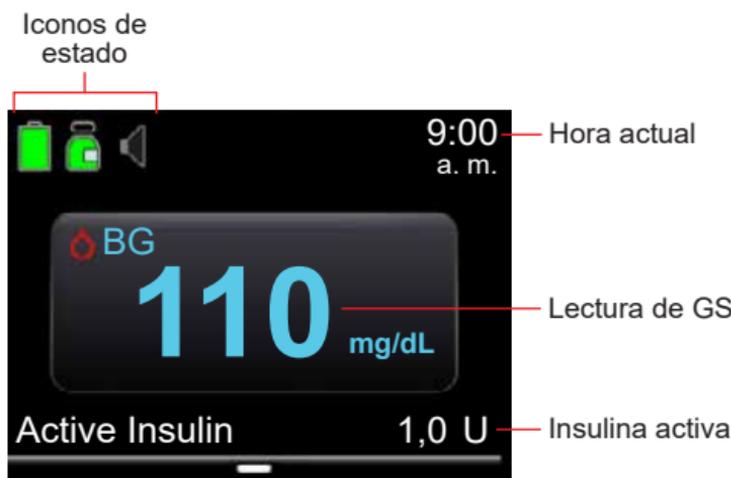

Pantalla de inicio con MCG en el modo manual:



Pantalla de inicio en el modo automático:



- Escudo del modo automático
- Valor de glucosa del sensor
- Insulina activa

Detención y reanudación de la infusión de insulina

| | |
|--|---|
| <p>Detener toda la infusión de insulina</p> <p>La opción Suspend Delivery (Suspender infusión) detiene toda la infusión de insulina (basal y bolus).</p> | <p>Para detener toda la infusión de insulina:</p> <ol style="list-style-type: none"> Vaya a la pantalla Suspend Delivery (Suspender infusión). Pulse ⊙ en la pantalla de inicio y seleccione Suspend Delivery (Suspender infusión). Seleccione Yes (Sí) cuando se indique. |
| <p>Reanudar la infusión de insulina basal</p> <p>La opción Resume (Reanudar) reinicia la infusión basal tras la suspensión de la bomba. La opción Resume (Reanudar) no reinicia una infusión de un bolus.</p> | <p>Para reanudar la infusión de insulina basal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pulse ⊙ en la pantalla de inicio y seleccione Resume Delivery (Reanudar infusión). Seleccione Yes (Sí) cuando se indique. <p>NOTA: Si había un basal temporal activo cuando suspendió la bomba, se reanudará si todavía queda tiempo restante.</p> |
| <p>Detener la infusión de un bolus</p> <p>La opción Stop Bolus (Parar bolus) detiene solamente una infusión de bolus. La opción Stop Bolus (Parar bolus) no detiene su infusión basal.</p> | <p>Para detener un bolus en el modo automático, un bolus normal en el modo manual o la parte Ahora de un bolus dual (Dual Wave®):</p> <ol style="list-style-type: none"> Pulse ⊙ en la pantalla de inicio y seleccione Stop Bolus (Parar bolus). Seleccione Yes (Sí) cuando se indique. Seleccione Done (Finalizado). <p>Para detener la infusión de un bolus cuadrado (Square Wave®) o la parte cuadrada de un bolus dual:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pulse ⊙ en la pantalla de inicio y seleccione Bolus (Bolus). Seleccione Stop Bolus (Parar bolus). Seleccione Yes (Sí) cuando se indique. |
| <p>Reanudación manual de la infusión de insulina basal durante un evento de suspensión activada por el sensor</p> <p>Si no desea esperar a que la bomba reanude automáticamente la infusión de insulina basal durante un evento Suspend before low (Susp. antes lím. bajo) o Suspend on low (Susp. en lím. bajo), puede reanudar manualmente la infusión basal.</p> | <p>Para reanudar manualmente la infusión basal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pulse ⊙ en la pantalla de inicio y seleccione Suspended before low (Susp. antes lím. bajo) o Suspended on low (Susp. en lím. bajo). Se abre la pantalla Suspend Status (Estado de suspensión) SmartGuard™. Seleccione Resume Basal (Reanudar basal). Seleccione Yes (Sí) cuando se indique. |

©2016 Medtronic MiniMed, Inc. Todos los derechos reservados.

MiniMed®, Dual Wave® y Square Wave® son marcas comerciales registradas de Medtronic MiniMed, Inc.

SmartGuard™ es una marca comercial de Medtronic MiniMed, Inc.

Medtronic



Medtronic MiniMed
18000 Devonshire Street
Northridge, CA 91325
USA
800 646 4633
818 576 5555
www.medtronicdiabetes.com

6026138-251_A